

Cardio First Angel

Asistente mecánico de RCP

Posición correcta. Frecuencia correcta. Presión correcta.

Para personas sin experiencia/entrenamiento en resucitación cardiopulmonar (RCP).

Fácil de usar. No utiliza baterías ni requiere mantenimiento.

Es el complemento ideal del DEA de uso público **FRED PA-1**.


Compacto y ligero.
Fabricado en Alemania.

Para empresas, sitios públicos, hogar y educadores en RCP.

El botón amarillo guía al primer respondiente: emite el sonido “clic” al presionar el pecho de la víctima, y hace “clac” al soltarlo.

Diagrama impreso para guiar al primer respondiente.

Se puede usar en entrenamientos y en situaciones reales.

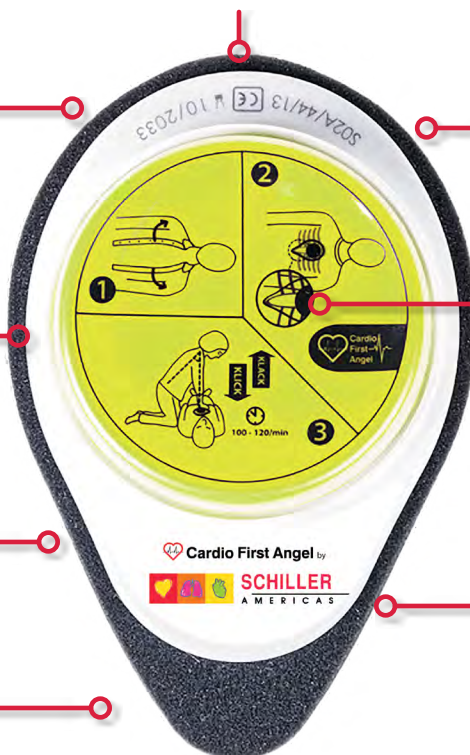

ACTUAR EN UNA EMERGENCIA PUEDE GENERAR ESTRÉS Y ANSIEDAD

- El **Cardio First Angel** permite brindar RCP eficaz a víctimas de parada cardíaca mayores de 16 años. Sus sonidos diferenciadores apoyan a las personas que intervienen en una emergencia de parada cardíaca, guiándolas para realizar compresiones de calidad.
- **Fácil de colocar:** Su forma ayuda a posicionarlo sobre el esternón.
- **Manos en la posición correcta:** Muestra cómo colocar las manos para dar las compresiones. Su diseño evita el contacto directo con la víctima.
- **Presión adecuada:** Al presionar el dispositivo sobre el pecho de la víctima, un “clic” indica que la compresión es efectiva (5-6 cm de profundidad).
- **Descompresión correcta:** Al dejar de presionar, un “clac” indica cuándo se debe iniciar la siguiente compresión (100-120 compresiones/min).



¡El dispositivo de RCP para todos!



No se requiere entrenamiento previo para usarlo

BASTAN 3 SENCILLOS PASOS PARA SALVAR UNA VIDA

-  **1** Llame de inmediato al 911 (o a la línea de emergencias de su país) para solicitar una ambulancia.
-  **2** Inicie la RCP con **Cardio First Angel** siguiendo las indicaciones impresas en el equipo. El clic-clac lo guiará para confirmar que está realizando la RCP de manera eficaz.

- 
-  **3** Si cuenta con un DEA, como el **FRED PA-1**, siga las indicaciones del equipo y permita que analice y recomiende o no una descarga.


RECOMENDADO PARA:

CARDIOPROTECCIÓN DE EMPRESAS



- Protege a sus colaboradores y clientes en caso de una parada cardíaca.
- Complemento a su estación de DEA
- Promueve una RCP eficaz (compresión y ritmo adecuado) que incrementa las probabilidades de supervivencia.

FORMADORES EN RCP

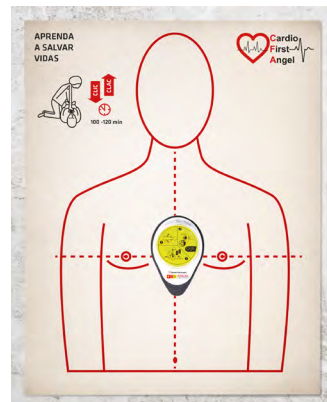

- Disponga de una herramienta profesional para la enseñanza de la RCP de calidad.
- Útil en ejercicios de entrenamiento, como en situaciones reales.
- De fácil uso para personas de todas las edades y niveles de habilidad.
- Incrementa la confianza de los alumnos al practicar la RCP adecuada.

Especificaciones técnicas

EQUIPO

Equipo médico: Clase I
Peso: 130 g.
Medidas: 15 X 10 X 5 cm (L/An/Al).
Origen: Fabricado en Alemania con certificación CE.
Operación: 100% mecánico. No requiere baterías ni mantenimiento.
Uso: Víctimas mayores de 16 años.
Vida útil: Hasta 8 años

USO RECOMENDADO

- Profesionales de la salud.
- Legos con entrenamiento en RCP.
- Cualquier persona, aunque no tenga experiencia ni entrenamiento en RCP.